

## **Notice technique – Monture de lunettes**

### **1. Identification du dispositif**

Nom commercial : PASTA

Fabricant : MATTHIEU DUCHENE DESIGN SRL

Représentant autorisé UE (si applicable) : MATTHIEU DUCHENE

Année de fabrication : [2016]

### **2. Description du dispositif**

Monture de lunettes destinée à accueillir des verres correcteurs ou solaires.

Dispositif médical de classe I selon le Règlement (UE) 2017/745.

Matériaux: ACIER INOXYDABLE

### **3. Indications d'utilisation**

Support de verres correcteurs .

Utilisation prévue : correction de la vision par l'adaptation de verres prescrits par un professionnel

### **4. Contre-indications**

Ne pas utiliser sans l'adaptation de verres correcteurs adaptés si prescrits.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue aux matériaux constitutifs (ex. nickel).

### **5. Instructions d'utilisation**

Confier le montage et l'ajustage à un opticien qualifié.

Mettre et retirer les lunettes avec les deux mains pour éviter la déformation de la monture.

Éviter les chocs, torsions ou exposition prolongée à des températures extrêmes (>60 °C).

### **6. Entretien et nettoyage**

Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux non abrasif.

Ne pas utiliser de solvants agressifs (alcool fort, acétone).

Ranger dans un étui rigide lorsqu'elles ne sont pas portées.

### **7. Risques résiduels et avertissements**

Risque de casse en cas de chute ou mauvaise manipulation.

Risque d'irritation cutanée si port prolongé ou allergie aux matériaux.

Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans (petites pièces détachables).

### **8. Durée de vie et élimination**

Durée de vie estimée : 5 ans selon usage et entretien.

Éliminer conformément à la réglementation locale des déchets ménagers ou filières spécialisées.