

Notice technique – Monture de lunettes

1. Identification du dispositif

Nom commercial : KNOTS

Fabricant : MATTHIEU DUCHENE DESIGN SRL

Représentant autorisé UE (si applicable) : MATTHIEU DUCHENE

Année de fabrication : [2025]

2. Description du dispositif

Monture de lunettes destinée à accueillir des verres correcteurs ou solaires.

Dispositif médical de classe I selon le Règlement (UE) 2017/745.

Matériaux : ACETATE /ACIER INOXYDABLE

3. Indications d'utilisation

Support de verres correcteurs .

Utilisation prévue : correction de la vision par l'adaptation de verres prescrits par un professionnel

4. Contre-indications

Ne pas utiliser sans l'adaptation de verres correcteurs adaptés si prescrits.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue aux matériaux constitutifs (ex. nickel).

5. Instructions d'utilisation

Confier le montage et l'ajustage à un opticien qualifié.

Mettre et retirer les lunettes avec les deux mains pour éviter la déformation de la monture.

Éviter les chocs, torsions ou exposition prolongée à des températures extrêmes (>60 °C).

6. Entretien et nettoyage

Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux non abrasif.

Ne pas utiliser de solvants agressifs (alcool fort, acétone).

Ranger dans un étui rigide lorsqu'elles ne sont pas portées.

7. Risques résiduels et avertissements

Risque de casse en cas de chute ou mauvaise manipulation.

Risque d'irritation cutanée si port prolongé ou allergie aux matériaux.

Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans (petites pièces détachables).

8. Durée de vie et élimination

Durée de vie estimée : 5 ans selon usage et entretien.

Éliminer conformément à la réglementation locale des déchets ménagers ou filières spécialisées.